


AUTO-SONDAGE ASEPTIQUE MASCULIN - GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ANATOMIE MASCULINE

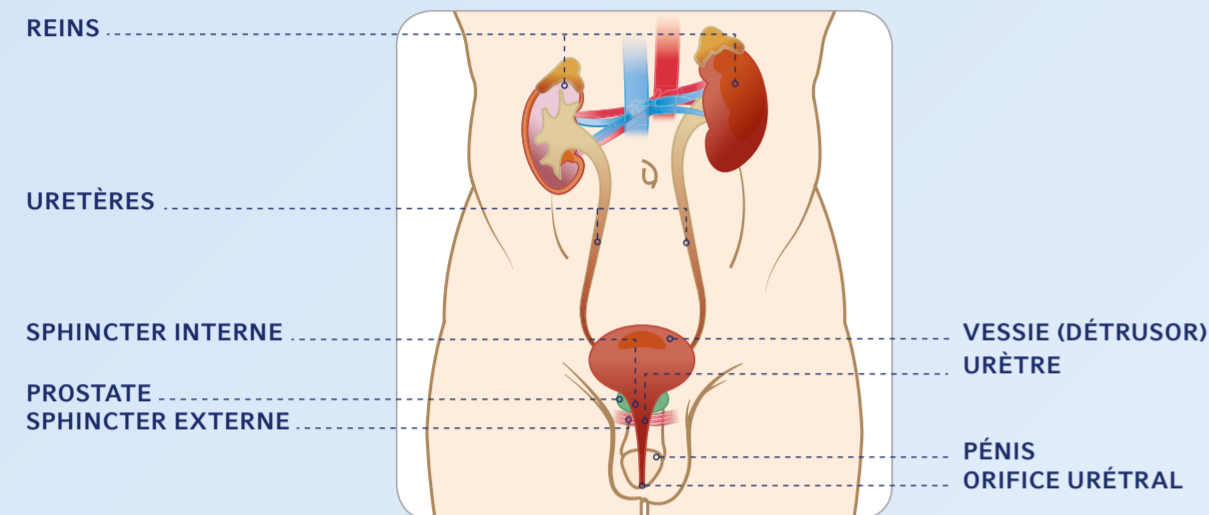

SONDE INTERMITTENTE AVEC REVÊTEMENT HYDROPHILE

LIQUICK BASE

Un concentré de confort et de sécurité



+ ASSISTANCE CLIENTS

N°Vert 0 800 500 150

Du lundi au vendredi de 9h à 17h.



1 Sans ouvrir l'emballage stérile, pressez le sachet contenant la solution saline doucement jusqu'à ce que le liquide se répande dans l'emballage. Balancez légèrement de part et d'autre l'emballage pour vous assurer que le liquide recouvre entièrement la sonde.



2 Déchirez l'emballage sur une longueur approx. de 10 cm. En attendant 30 secondes jusqu'à l'activation totale du revêtement hydrophile de la sonde, vous pouvez suspendre l'emballage de la sonde en vue de la prochaine étape.



3 Avant de commencer chaque sondage, lavez-vous toujours soigneusement les mains à l'eau et au savon et/ou désinfectez-les en respectant les instructions de lavage hygiénique des mains selon les recommandations de l'OMS.



4 Choisissez une position confortable et la plus adaptée à votre état et à votre emplacement.



5 Désinfectez et/ou lavez également la région génitale ainsi que l'orifice urétral (méat) à l'eau et au savon avant chaque sondage.



6 Décalottez délicatement le prépuce si vous n'êtes pas circoncis. De votre main non dominante (la main que vous n'utilisez pas pour tenir la sonde), maintenez votre pénis tendu et dirigé vers le haut. Ne comprimez pas le pénis, car cela pourrait bloquer l'orifice urétral et rendre difficile le passage de la sonde.



7 Retirez la sonde à l'aide du manchon de protection bleu. Si nécessaire, poussez le manchon de protection bleu vers l'extrémité de la sonde.



8 En tenant la sonde par le manchon de protection bleu avec votre main dominante, vous pourrez ainsi l'insérer dans l'orifice urétral sans aucun contact avec les mains. Insérez lentement la sonde.



9 L'urine commence à s'écouler lorsque la sonde atteint la vessie. Assurez-vous que le godet de la sonde soit dirigé vers les toilettes ou un réceptacle adapté.



10 Drainez entièrement votre vessie lors de chaque sondage pour éviter les infections des voies urinaires. Lorsque le débit urinaire s'arrête ou ralentit, retirez légèrement la sonde et arrêtez-vous si l'urine recommence à s'écouler.



11 Dès que l'urine arrête de s'écouler, retirez lentement et délicatement la sonde de l'urètre à l'aide du manchon bleu. Il peut être utile de plier la sonde au-dessus du godet pour éviter tout écoulement d'urine ou éclaboussure.



12 Si vous n'êtes pas circoncis, assurez-vous de replacer le prépuce sur le gland et de laver l'extrémité de votre pénis.



13 Placez la sonde usagée dans l'emballage. Jetez le système de sondage. Votre professionnel de santé vous indiquera la meilleure méthode pour mettre au rebut la sonde. Ne la jetez pas dans les toilettes.



14 Terminez la procédure en vous lavant de nouveau les mains.

TELEFLEX MEDICAL SAS FRANCE

31460 Le Faget · Tél. +33 5 62 18 79 40 · Fax +33 5 61 83 35 84 · info.urologie@teleflex.com
www.teleflex-homecare.fr

Teleflex, le logo Teleflex et Liquick Base sont des marques commerciales ou déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Les informations incluses dans le présent document ne sauraient se substituer à la notice du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Données en cours de validité à la date d'impression (05/2016). Susceptible de modifications techniques sans préavis. © 2016 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Liquick Base* est un dispositif médical de classe Is. Fabricant: Medical Service GmbH. Organisme notifié: Dekra CE 0124. *Produit remboursé par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations: consultez les modalités sur le site ameli.fr. 94 08 30 - 00 00 02 - REV A - HH / SF - 05 16 01