

my  
life

OmniPod®

PATCH  
& POMPE

# Enfin.

Traitement à l'insuline sans  
multi-injections et sans  
tubulures.



Plus de liberté. Plus de confiance. Avec mylife™.

**YPSOMED**  
SELF-CARE SOLUTIONS

## Tous les avantages de la thérapie à la pompe d'insuline ...

**Plus de flexibilité** : Vous pouvez faire la grasse matinée le week-end, décider de faire du sport sans avoir planifié ou apprécier une collation à minuit. Grâce aux paramètres de débit de base et des différentes options de bolus, vous avez le choix de mener votre vie comme vous l'entendez.

**Finies les injections multi-quotidiennes** : Une insertion rapide de temps en temps permet de couvrir votre délivrance d'insuline.

**Un meilleur contrôle est important** : La thérapie par pompes à insuline offre un meilleur contrôle par rapport aux injections, réduisant considérablement la fréquence des hyper et hypoglycémies. Un meilleur contrôle réduit le risque de complications du diabète.

**Moins de stress** : Les personnes ayant choisi le traitement par pompe à insuline sont très satisfaites de leur thérapie. Elles apprécient une plus grande flexibilité et ont moins de problèmes d'hypoglycémie que les personnes utilisant le traitement par injections.

## Les utilisateurs d'OmniPod® aux États-Unis ont été séduits par cette forme de traitement<sup>1</sup>

**98%** Vivre avec le diabète devient alors plus facile

**96%** Le choix de l'OmniPod® est incontestable par rapport au traitement précédent

**95%** Ces utilisateurs recommanderaient sans hésiter le système OmniPod® autour d'eux

<sup>1</sup> Enquête d'Insulet Corporation aux USA. Toutes les personnes interrogées ont porté le Pod pendant 1 an au moins.



OmniPod®

... avec les bénéfices de **mylife™ OmniPod®**

**Appréciez la vie** : Sans tubulure. Le Pod ne vous gênera pas durant vos activités quotidiennes : vous pouvez dormir, faire du sport et vivre sans aucune gêne.

**Vous n'aurez plus à utiliser une aiguille** : toutes les pompes à insuline éliminent l'utilisation des injections. Et désormais, le mylife™ OmniPod® vous offre une insertion sans douleur, automatique sans l'utilisation de vos mains, sans qu'aucune aiguille ne soit visible.

**Pas besoin de retirer le patch** : vous pouvez le conserver sous la douche, le bain, la piscine ou la mer – le Pod reste sur vous. Il n'est pas nécessaire d'interrompre votre délivrance d'insuline.

**La simplicité est de mise** : Le PDM sans fil, muni du lecteur de glycémie intégré, vous guide à travers le menu étape par étape à l'aide d'instructions simples, et il vous propose des textes d'aide pour encore mieux l'utiliser.

**Options alternatives de placement** : Vous n'avez pas besoin de porter le Pod au niveau de la ceinture. Le Pod peut être porté partout où une injection serait également possible. Le PDM peut être tout simplement rangé dans votre sac à main ou votre sac à dos. Le programme basal activé fonctionne même lorsque la connexion est inactive entre le Pod et le PDM.





OmniPod®



## Je suis libre

mylife™ OmniPod® a la capacité  
d'améliorer la qualité de vie

“ J'apprécie énormément la liberté que me procure le Pod. Fini les tubulures gênantes et je n'ai plus besoin de vivre ma vie en gardant l'oeil sur la montre. Je mange ce que je veux quand je veux. Je peux me déplacer librement et je n'ai plus à me soucier de mon traitement.

Je vis ma vie avec mylife™ OmniPod®.”





## Le Pod

Réservoir d'insuline, canule flexible et pompe en une seule unité

- **Patch & Pompe** : Rapide et simple à installer.
- **Tout en un** : réservoir d'insuline, canule flexible, applicateur, pompe et piles.
- **Insertion automatique** de la canule flexible en une fraction de seconde.
- **Cohérence** : La canule est insérée à un angle de 45° et à une profondeur de 6.5 mm.
- **Étanchéité** : IPX8 jusqu'à 7.5 m pendant jusqu'à 60 minutes.
- **Options attrayantes de placement** :  
Le Pod peut être appliqué dans un éventail d'endroits discrets.
- **Volume du réservoir flexible** : Le Pod peut être rempli de 85 à 200 U d'insuline.
- **Léger** : 34 g avec un réservoir plein.





## Le PDM (Personal Diabetes Manager)

Commande et lecteur de glycémie dans un seul dispositif



- **Intelligent et simple d'utilisation**
- **Liaison sûre unique :**  
Commande le Pod sur la base de vos paramètres par le biais d'une fréquence radio sûre.
- **7 profils** de débit de base composés de 24 segments chacun
- **Lecteur de glycémie FreeStyle®** intégré muni d'une fente d'insertion de bandelette éclairée. Utilise les bandelettes Freestyle Papillon Easy.
- **La délivrance d'un bolus calculé est proposée**  
sur la base de la glycémie actuelle, des glucides enregistrées et de l'insuline toujours active dans l'organisme (AI) – facultatif.
- **Vérification facile** des valeurs enregistrées par le biais d'un affichage sous forme de graphique.
- **La gestion optimale des données** enregistre et offre un résumé des données pour une durée de 90 jours.
- **Lecture simplifiée** grâce au large écran LCD couleur.
- **Des alertes personnelles** peuvent être réglées.

**mylife™ OmniPod®**

Facile à comprendre, simple à utiliser

La conception exceptionnelle et unique du mylife™ OmniPod® a permis de réduire le nombre d'accessoires au strict minimum.

- Plus de longue tubulure à remplir.
- Plus d'accessoires variés à assembler.
- Plus d'aiguille à insérer manuellement.

Grâce à mylife™ OmniPod®, la délivrance de votre insuline s'effectue en quelques étapes.



Remplissez le Pod, désinfectez la peau, retirez le cache de la canule et la pellicule protectrice autocollante.



Collez le Pod, appuyez, c'est fait !



En appuyant sur « Démarr », la canule flexible est insérée automatiquement.

Plus de **liberté**.  
Plus de **confiance**.  
Avec **mylife™**.



Lecteur pour  
auto-surveillance  
glycémique



Systèmes pour  
perfusion



Aiguilles pour stylo  
et aiguilles sécurisées  
pour stylo



Accessoires  
et Services

mylife™ est une gamme de produits et de services pour les personnes souffrant de diabète. Elle leur offre tout le nécessaire pour assurer un traitement autonome simple et fiable, qui leur offre plus de liberté et de confiance pour la vie qu'ils rêvent de mener.



Pour tester le **mylife™ OmniPod®**  
ou si vous souhaitez changer de thérapie,  
vous devez contacter votre équipe médicale !

Service Hotline 0800 883058

Pour plus d'information visitez [www.mylife-diabetescare.fr](http://www.mylife-diabetescare.fr)

Ypsomed S.A.S // 18 / 20 rue Soleillet // FR – 75020 Paris

T +33 (0)158 702000 // F +33 (0)158 702001 // [info@ypsomed.fr](mailto:info@ypsomed.fr)